

ELEMENTY & AKCESORIA



PRECI-SAGIX PATRYCA P

Kulkowa patryca do odlewu z twardych stopów

Mini \varnothing 1,7:

1321 6 szt. # 1321B 50 szt.

Standard \varnothing 2,2:

1371 6 szt. # 1371B 50 szt.



PRECI-SAGIX PATRYCA M

Patryca NOPRAX** do odlewu ze stopów metali nieszlachetnych

Mini \varnothing 1,7:

1322 2 szt. # 1322B 20 szt.

Standard \varnothing 2,2:

1372 2 szt. # 1372B 20 szt.



PRECI-SAGIX PATRYCA V

Standardowa patryca NOPRAX** \varnothing 2,2 mm z gwintem M2. Wewnętrzny sześciokąt: 0,9 mm.

Używać śrubokręta IMP-XS-042.

1373 1 szt.

PRECI-SAGIX PIERŚCIEN BASE

Do odlewu w technice IRAX* (stopy metali szlachetnych) lub NOPRAX** (stopy metali nieszlachetnych).

Gwint M2 do Standardowej patrycy # 1373

RA 0063 STOPY IRAX* 1 szt.

RA 0064 STOPY NOPRAX** 1 szt.



PRECI-SAGIX 2,2 PATRYCA VCC

Patryca \varnothing 2,2 TITANAX*** do aplikacji CAD/CAM.

Gwint: M2 x 0,35. Wewnętrzny sześciokąt: 0,9 mm.

Używać śrubokręta IMP-XS-042.

1374 1 szt.



PRECI-SAGIX OBUDOWA

Obudowa matrycy z Cr-Co (Co 65-Cr 28-Mo 6) do wpolimeryzowania do tworzywa akrylnowego, do lutowania za pomocą CEKA SOL lub do spawania za pomocą lasera.

Mini \varnothing 1,7: H 3,3 mm - W 3,8 mm - L 9,1 mm

1325 2 szt. # 1325B 20 szt.

Standard \varnothing 2,2: H 4,5 mm - W 4,9 mm - L 9,5 mm

1375 2 szt. # 1375B 20 szt.



PRECI-SAGIX UTRZYMYWACZ RÓWNOLEGŁOŚCI

Uniwersalny utrzymywacz równoległości do patryc PRECI-SAGIX

1300 P dla \varnothing 1,7 i 2,2 1 szt.



ŚRUBOKRĘT DO PATRYC Z GWINTEM PRECI-SAGIX

Długość całkowita: 26 mm - Zewnętrzny sześciokąt: 0,9 mm

IMP-XS-042 1 szt.



PRECI-SAGIX KLUCZ DO MONTAŻU MATRYC

Uniwersalny utrzymywacz matryc PRECI-SAGIX

1323 dla \varnothing 1,7 i 2,2 1 szt.



PRECI-SAGIX ANALOGI

Analogi patryc

1331 dla \varnothing 1,7 2 szt.

1381 dla \varnothing 2,2 2 szt.

* IRAX 1400-1460 °C - Do odlewu tylko ze stopami metali szlachetnych.

Au 60 - Pt 24 - Pd 15 - Ir 1

** NOPRAX 1355-1450 °C - Do odlewu tylko ze stopami metali nieszlachetnych.

Ni 72 - Cr 17 - Fe 10 - Mn 1

*** TITANAX - Tylko do klejenia lub montowania w tworzywie. Ti 90 - Al 6 - V 4

Nie rozgrzewać!

CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADICULAR
PRECI-BALL

CEKA EXTRACORONAL
PRECI-VERTIX
PRECI-CLIX EC
PRECI-SAGIX
PRECI-52

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP

PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO
CEKA Multi

01.
AXIAL
ATTACHMENTS

02.
EXTRACORONAL
ATTACHMENTS


03.
PROFILE
ATTACHMENTS

SPECIALTIES

02.
EXTRACORONAL
ATTACHMENTS

PRECI-SAGIX
POLSKI

WWW.CKPL.EU

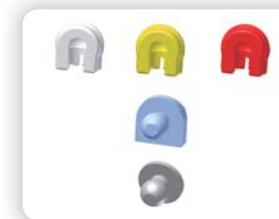

CEKA PRECI-LINE APP



Prospekt nr. 287.PL-ed.B

© Copyright ALPHADENT NV 9/2014 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV • Mannebeekstraat 33 8790 Waregem, Belgium

T +32 56 629 531 • E info@ckpl.eu



CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE


PRECI-SAGIX

ZATRZASKI KULKOWE Z DZIELONĄ MATRYCĄ DO PROTEZ CZĘŚCIOWYCH I ZASTOSOWAŃ IMPLANTOPROTETYCZNYCH

PATENTED



- ✓ **Opatentowany mechanizm mucojący**
- ✓ **Ekonomiczny**
- ✓ **Szeroki zakres zastosowań**
- ✓ **Łatwa wymiana elementów**
- ✓ **Wybór procedur roboczych**
- ✓ **Długotrwała retencja**

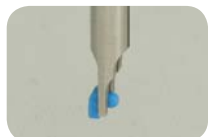

1a. Patryca z tworzywa do odlewu. Wyznaczyć tor wprowadzenia. Umocować patrycę do odlewu (# 1321 lub # 1371) w utrzymywaczu (# 1300 P) i połączyć z wymodelowaną konstrukcją. Zalecane jest wykonanie ramienia kłamy w przypadku protez ruchomych. Odlewać twardym stopem dentystycznym.



1b. Metalowa patryca do odlewu. Wyznaczyć tor wprowadzenia. Połączyć patrycę NOPRAX** (# 1322 lub # 1372) z Wax-Up'em za pomocą utrzymywacza równoległości (# 1300 P). Zalecane jest wykonanie ramienia kłamy w przypadku protez ruchomych. Odlewać stopem metali nieszlachetnych.



1c. Gwintowana patryca. Wyznaczyć tor wprowadzenia. Połączyć gwintowaną patrycę (# 1373, Standard \varnothing 2,2 mm) z pierścieniem bazowym IRAX* (# RA 0063 - stopy metali szlachetnych) lub NOPRAX** (# RA 0064 - stopy metali nieszlachetnych). W tym celu należy użyć śrubokręta (# IMP-XS-042). Połączyć całość za pomocą utrzymywacza równoległości (# 1300 P) z wymodelowaną konstrukcją. Wykręcić patrycę. Zatopić w masie osłaniającej i następnie odlać. Plastikowe profile belki (# IMP-CK-014) są również dostępne.



2a. Obróbka matrycy. Należy zawsze używać różowych elementów pomocniczych przy powielaniu modelu! Umieścić różowe elementy pomocnicze na patrycach i sprawdzić równoległość. Zablokować podcienie i następnie powielić model w masie osłaniającej.



Pokryć replikę woskiem i odlać szkielet. Podczas obróbki protezy szkieletowej należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić stopnia retencyjnego. Wypolerować łoże na wysoki połysk. Wcisnąć różową matrycę (# 1316 lub # 1366) za pomocą utrzymywacza matryc (# 1323) w łoże aby móc rozpocząć pracę z akrylem.



Obudowa matrycy z chrom-kobaltu (# 1325 lub # 1375)
Stosować zawsze elementy do dublowania (# 1316 lub # 1366) aby uzyskać dokładne odwzorowanie w masie osłaniającej. Wymodelować protezę woskowa i pozostawić miejsce na obudowę matrycy obok części (# 1316 lub # 1366).



Wymiana matrycy
Usunąć matrycę za pomocą ostrego instrumentu. Nową matrycę włożyć przy użyciu utrzymywacza (# 1323).
Możliwe jest uzyskanie 3 wartości siły retencyjnej:
żółty: normalna retencja
biały: zredukowana retencja
czerwony: silna retencja

ZESTAWY STARTOWE



PRECI-SAGIX ZESTAW STARTOWY P
Zestaw startowy zawiera: **plastikowe patryce do odlewu**, potrzebne narzędzia i matryce o 3 wartościach retencyjnych dla rozmiaru \varnothing 1,7 i \varnothing 2,2. Odlewać patryce każdym twardym stopem dentystycznym.
Zestaw 22 elementowy:
2 + 2 **plastikowe** patryce do odlewu
2 + 2 **żółte** matryce (normalna retencja)
2 + 2 **białe** matryce (zredukowana retencja)
2 + 2 **czerwone** matryce (silna retencja)
2 + 2 matryce pomocnicze
1 uniwersalny utrzymywacz równoległości
1 uniwersalne narzędzie chwytak
Zestaw startowy patryce do odlewu: # 1301



PRECI-SAGIX ZESTAW STARTOWY M
Zestaw startowy zawiera: **patryce do odlewu NOPRAX**, potrzebne narzędzia i matryce o 3 wartościach retencyjnych dla rozmiaru \varnothing 1,7 i \varnothing 2,2. Używać stopów metali nieszlachetnych.
Zestaw 22 elementowy:
2 + 2 patryce do odlewu **NOPRAX**
2 + 2 **żółte** matryce (normalna retencja)
2 + 2 **białe** matryce (zredukowana retencja)
2 + 2 **czerwone** matryce (silna retencja)
2 + 2 matryce pomocnicze
1 uniwersalny utrzymywacz równoległości
1 uniwersalne narzędzie chwytak
Zestaw startowy patryce do odlewu: # 1303

MATRYCE PRECI-SAGIX

PRECI-SAGIX MATRYCE - poliacetal

Mini \varnothing 1,7: wysokość: 3,1 mm - \varnothing 3,1 mm
Żółte matryce - normalna siła retencji:
1311 6 szt. # 1311B 50 szt.
Białe matryce - zredukowana siła retencji:
1312 6 szt. # 1312B 50 szt.
Czerwone matryce - silna siła retencji:
1313 6 szt. # 1313B 50 szt.
Zestaw mieszany:
1314 2 + 2 + 2 szt.
Standard \varnothing 2,2: wysokość: 4,1 mm - \varnothing 4,2 mm
Żółte matryce - normalna siła retencji:
1361 6 szt. # 1361B 50 szt.
Białe matryce - zredukowana siła retencji:
1362 6 szt. # 1362B 50 szt.
Czerwone matryce - silna siła retencji:
1363 6 szt. # 1363B 50 szt.
Zestaw mieszany:
1364 2 + 2 + 2 szt.



PRECI-SAGIX ELEMENTY POMOCNICZE

Mini \varnothing 1,7:
1316 6 szt. # 1316B 50 szt.
Standard \varnothing 2,2:
1366 6 szt. # 1366B 50 szt.

