

SPECIALTIES

PERMA-RET NL-PL-GR-RU-SK



CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

PERMA-RET



Mechanische retentie voor kunststof- en composiettanden.

De edelmetaaldraad wordt in de voorgeboorde opening gedraaid en afgesneden.

Buig de draad voor bijkomende retentie.



Mechaniczne retencje dla zębów z akrylu i kompozytu.

Drut z metalu szlachetnego wkręcamy do wywierconego otworu w zębie i odcinamy.

Przez zagięcie drutu otrzymujemy dodatkową retencję.



Μηχανική συγκράτηση ακρυλικών δοντιών στην οδοντοστοιχία.

Με το ειδικό τρυπάνι ανοίγουμε την οπή υποδοχής του σύρματος. Βιδώνουμε το σύρμα από πολύτιμο κράμα στην διανοιχθείσα οπή και κόβουμε την περίσσια.

Κάμπτουμε το σύρμα για μεγαλύτερη συγκράτηση.



Для механической ретенции композитных и акриловых зубов.

Сделайте отверстие спиральным сверлом.

Проволока из драгоценного металла с резьбой вворачивается в отверстие и обрезается.

Согните проволоку для дополнительной ретенции.



Mechanická retencia pre akrylové a kompozitné zuby.

Otvor je vyvŕtaný so špirálovým vrtákom. Drôt z

drahého kovu je zašróbovaný do otvoru a odrezaný.

Ohnite pre zvýšenie retencie.

PERMA-RET



1



2



3



4



1601

1 x



100 cm



3 x



1602

100 cm



CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADICULAR
PRECI-BALL

01.
AXIAL
ATTACHMENTS

CEKA EXTRACORONAL
CEKA ID
PRECI-VERTIX
PRECI-VERTIX AT
PRECI-CLIX EC
PRECI-SAGIX
PRECI-52
PRECI-TUBIX/MORTIX

02.
EXTRACORONAL
ATTACHMENTS

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP

03.
PROFILE
ATTACHMENTS

PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKALLOY
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO

SPECIALTIES

WWW.CKPL.EU

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE



Prospectus n° 260.M1-ed.A

© Copyright ALPHADENT NV 10/2011 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium
T+32 56 629 100 - **F**+32 56 629 101 - **E**info@ckpl.eu

