

01.

AXIALE ATTACHMENTS

PRECI-CLIX
RADIKULÄR
DEUTSCH



CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

PRECI-CLIX RADIKULÄR

LEICHT UND SCHNELL EINZUARBEITEN

PRECI-CLIX RADIKULÄR wird vom Zahnarzt selbst in einer einzigen Sitzung eingearbeitet. Der Patient erhält dabei eine dauerhafte Verankerung für seine Hybridprothese. Sowohl die Titanpatrize als auch die Kunststoffmatrize sind im Handumdrehen zu ersetzen. Das hörbare Einrasten gibt dem Patienten Sicherheit beim Eingliedern seiner Prothese.



Patientenkomfort:

PRECI-CLIX RADIKULÄR bietet eine Lösung für das Restgebiss mit einer schwachen Prognose.


Schnell und vorteilhaft:

vom Zahnarzt leicht und schnell einzuarbeiten;
weitaus preisgünstiger als herkömmliche
Kugelattachments.

Einfache Nachsorge:

ausschraubbare, also ersetzbare Patrize und
Kunststoffmatrizen in drei verschiedenen
Retentionswerten

ANBRINGEN DER PRECI-CLIX-ATTACHMENTS

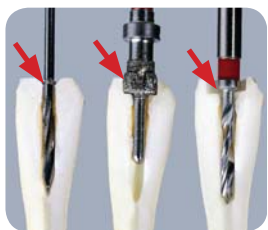

ANBRINGEN DER PRECI-CLIX-ATTACHMENTS

Der Zahnarzt kann die Patrize im aufbereiteten Wurzelkanal fixieren und die Matrize selber einpolymerisieren bzw. im Labor in die Prothese einarbeiten lassen.

1. Präparieren Sie den Wurzelkanal zunächst mit dem Penetrationsfräser, dann mit dem Diamantbohrer für die Basis des PRECI-CLIX-Wurzelstiftes und schließlich mit dem Erweiterer, damit der Stift passgenau sitzt.
2. Schrauben Sie das schwarze Abdruckhilfsteil in den Wurzelstift. Kontrollieren Sie den Sitz und zementieren Sie den Wurzelstift.
3. Nehmen Sie eine Abformung mit dem schwarzen Abdruckhilfsteil und schicken Sie sie zusammen mit dem Modellanalog ins Labor.
4. Setzen Sie Abdruckhilfsteil und Modellanalog in die Abformung und fertigen Sie ein Hartgipsmodell an.
5. Schrauben Sie die Patrize mit dem Schraubenzieher in den Modellanalog.
6. Legen Sie das Gehäuse auf eine ebene Fläche. Setzen Sie die gelbe Kunststoffmatrize auf den Eindrückstift und drücken Sie sie in das Gehäuse.
7. Legen Sie den schwarzen Platzhalter über die Patrize. Drücken Sie die Matrize darüber. Blocken Sie die untersichgehenden Bereiche aus. Die Oberfläche der Stiftwurzelkappe kann ggf. auch mit dem mitgelieferten Platzhalter aus Zinnfolie abgedeckt werden.
- 8-10. Polymerisieren Sie die Prothese über die Matrizen. Sichern Sie das Gewinde der Patrize mit CEKA BOND, um die ungewollte Lockerung zu verhindern.

Nachsorge

Verwenden Sie zum Entfernen einer Kunststoffmatrize ein heißes Instrument. Setzen Sie eine neue Matrize auf den Eindrückstift und drücken Sie sie in das Gehäuse.

- Gelbe Matrizen haben eine normale Retention.
- Weiße Matrizen haben weniger Retention.
- Rote Matrizen haben mehr Retention.





PRECI-CLIX-ZAHNARZTSATZ

1299

- 2 x 1291 radikuläre PRECI-CLIX RTI-Kugelattachments
 1 x 1226 Satz mit 3 Bohrern
 1 x 1222 Eindrückstift
 1 x IMP-XS-042 Schraubenzieher
 1 x RE H 2 Abdruckhilfsteil (2 St.)
 1 x RE H 14 Modellanalogue (2 St.)
 1 x 1234 Ersatzmatrizen (3 x 2 St.)
 1 x CB1 CEKA BOND: anaerobes Sicherungsmittel zum Verhindern der ungewollten Lockerung der Patrizie

SATZ



PRECI-CLIX RTI

1291

Matrizengehäuse zum Einpolymerisieren in den Kunststoff. Zementierbarer Titanstift mit ausschraubbarer Titanpatrizie.

Satz



PRECI-CLIX-GEHÄUSE

1235

6 St.

1235B

50 St.

Matrizengehäuse aus einer anodisierten Titanlegierung zum Einpolymerisieren in den Kunststoff. Höhe: 2,65 mm - ø 4 mm



PRECI-CLIX-MATRIZE

Polyacetal. Höhe: 2,65 mm - ø 3,55 mm

Normale Retention:

1231 gelb

6 St.

1231B gelb

50 St.

Reduzierte Retention:

1232 weiß

6 St.

1232B weiß

50 St.

Starke Retention:

1233 rot

6 St.

1233B rot

50 St.

Kombinationspackung:

1234

2 + 2 + 2 St.



PRECI-CLIX-PATRIZE V

Ausschraubbare Patrizie aus Titanlegierung.

Höhe: 3,05 mm - ø 2,25 mm - Innensechskant: 0,9 mm

1206 C

1 St.



PRECI-CLIX-WURZELSTIFT

Zementierbarer Wurzelstift aus Titanlegierung.

Stiftlänge: 7 mm - ø 1,35 mm

ø Basis: 3,4 mm - Gewinde: M2

1291 C

1 St.

CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADIKULÄR
PRECI-BALL

01.
AXIALE
ATTACHMENTS

CEKA EXTRAKORONAL
PRECI-VERTIX
PRECI-CLIX EC
PRECI-SAGIX
PRECI-52

02.
EXTRAKORONALE
ATTACHMENTS

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP

03.
PROFIL
ATTACHMENTS

PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO
CEKA Multi

SPEZIALITÄTEN

WWW.CKPL.EU

CEKA PRECI-LINE APP



CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

Prospekt Nr. **274.D-ed.E**
© Copyright ALPHADENT NV 9/2014 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk
ALPHADENT NV • Mannebeekstraat 33 8790 Waregem, Belgium
T+32 56 629 531 - **E**info@ckpl.eu